

CCF

CE Marquage européen

Fabricant du produit

⚠ Attention lire toutes les mises en garde et mesures de précaution du mode d'emploi

MD Dispositif médical

REF Référence

📖 Mode d'emploi

LOT Numéro de lot

CE Mention réglementaire (RDM 2017/745) : « ... tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel [...] le patient est établi. »

Service consommateurs. Si vous avez des questions ou remarques sur votre produit, consulter votre revendeur ou envoyer un email à : info@graphite-medical.com

GRAPHITE MEDICAL
53 rue Reine Lacour, ZAC Europarc
71850 Charnay-lès-Mâcon (France)
Tél. : +33 (0)4 74 60 46 39

www.graphite-medical.com


GRAPHITE
MEDICAL

Photos non contractuelles. ©. Conserver cette notice - CCF - 06/2014 - Rev3

CCF

ÉCHARPE COUDE AU CORPS FILET CCF

Références : CCF XS à CCF XL

Dispositif médical de classe I,  pour patient unique - à usages multiples. Au moins la première installation doit être effectuée par un professionnel de la santé qualifié.

Pour les enfants, les installations ultérieures doivent être effectuées par un adulte. Durée et modalités d'utilisation sous contrôle de votre prescripteur.

Utilisation prévue et groupe cible de patients :

CCF est une écharpe d'immobilisation d'épaule pour adultes et enfants selon les tailles disponibles.

RÉF.	GTIN	T. DE TAILLE
CCF XS (2 à 5 ans)	3615650001191	60 cm
CCF S	3615650001207	80 cm
CCF M	3615650001214	100 cm
CCF L	3615650001221	120 cm
CCF XL	3615650001238	140 cm



Tour de taille



GRAPHITE
MEDICAL

Indications :

- Maintien post-traumatique de l'épaule, du bras et de l'avant-bras.
- Luxations, entorses, lésions tendineuses de l'épaule.
- Fractures (tête humérale, omoplate, clavicule).
- Utilisation pré ou postopératoire.

Actions :

- Echarpe à visée antalgique pour l'épaule, le bras et l'avant-bras.
- Décharge l'épaule en soutenant le bras.
- Limite les mouvements de rotation et d'abduction.

⚠ Contre-indications et précautions d'emploi :

- S'assurer auprès de votre médecin que maladies cutanées, troubles de la circulation (lymphatique/sanguine) ou troubles de la sensation ne soient pas incompatibles avec le port de l'orthèse.
- Toute modification inadéquate apportée au produit et/ou utilisation non destinée à l'usage prévu excluent la responsabilité du fabricant.
- Vérifier le bon état apparent du produit et de son emballage avant utilisation.
- Ne pas appliquer sur plaie non protégée.
- Veiller à utiliser la taille adéquate.
- Veiller à bien verrouiller les fermetures auto-agrippantes.
- Veiller à ne pas trop serrer les sangles.

- Eviter l'application de corps gras (crèmes, pommades).
- En cas de signes d'allergie cutanée, de douleurs ou de gêne inhabituelle, demander un avis médical.
- Ne pas exposer à toute source de chaleur susceptible de provoquer l'inflammation du dispositif (flamme, surface chaude ...).
- Ne pas conduire avec cette écharpe.

EFFETS INDESIRABLES :

En cas de fracture de l'humérus :

- Nécrose avasculaire, instabilité, absence de soudure, raideur, déchirure, douleur, chirurgie ou thérapie secondaire.

En cas de fracture de la clavicule :

- Absence de soudure, dysesthésie autour et sous le site de la fracture.

Description :

- Echarpe d'immobilisation d'épaule coude au corps en filet.
- Peut être portée sur un vêtement ou à même la peau.
- Comprend un support de bras prolongé par une bretelle d'épaule.
- Blocage au corps par sangle de taille amovible.
- Parois de l'écharpe en tissu ajouré pour une bonne régulation thermique.
- Sangle de cou en mousse confortable, intérieur bouclette coton.
- Biais doux (sangles).
- Qualité de fermeture Velcro.
- Modèle bilatéral.

Entretien et stockage :

🧼 Lavage à la main, eau tiède (30°C) et savon neutre SANS eau de javel. ❌ Ne pas blanchir. ❌ Ne pas nettoyer à sec. Essorage par pression sans tordre le produit. ❌ Ne pas sécher au sèche-linge, séchage à l'air ambiant SANS soleil, ou autre source de chaleur. ❌ Ne pas repasser.

Stocker dans un environnement propre, à l'abri de l'humidité ☔, à température ambiante et à l'abri de la lumière ☀.

Application :

A-Placer l'avant-bras dans l'écharpe en filet
B-Passer la bretelle d'épaule dans le dos et sur l'épaule opposée. Insérer la bretelle dans le passant plastique et fermer par Velcro.
C- La sangle de taille s'ajuste à chaque extrémité au travers de passants plastique.



A



B



C

Réutilisation et mise au rebut :

- Ce produit est adapté à votre traitement. Ne pas le réutiliser sans avis médical. Ne pas le transmettre à une tierce personne.

♻ Mise au rebut selon les dispositions légales en vigueur dans votre pays.

Composition et numéro de lot :

- Voir étiquette sur le produit.



Optionnel :
lien de soutien du pouce