

DOSSERET P951D



80 kg/m³



Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée multiportance



► DESCRIPTIF

Dossieret moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ multiportance

► INDICATIONS

Amélioration du positionnement et du confort du patient dans son fauteuil.
Aide à la prévention de l'instabilité sagittale (glisser-avant).




LPP :

Conditions de prise en charge : se référer au Guide de la prescription et à ameli.fr

► MODÈLES DISPONIBLES



Dossieret P951D
Viscoélastique multiportance

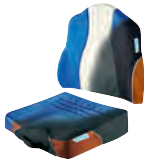


Packs thérapeutiques
(voir page 48)



Dossieret P952D HR

40 kg/m³

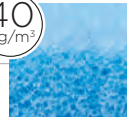

Mousse haute résilience

PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE *Plus d'infos p. 51*

P951D :



Avec housse(s) POLYMAILLE®



→ Enduction polyuréthane sur textile jersey



→ En regard de la zone dorsale, tissu de type enduction polyuréthane bi-extensible hautement respirante et imperméabilisée.



→ Tissu de type toile enduite souple, résistante à l'abrasion et aux contraintes d'une utilisation quotidienne intensive.



→ Tissu technique hautement résistant positionné en regard des zones à forte contrainte d'abrasion.

P952D :



Avec housse(s) POLYMAILLE®



→ Enduction polyuréthane sur textile jersey



SYSTÈME D'ACCROCHE UNIVERSELLE (P951D & P952D)

→ S'adapte à la plupart des modèles de fauteuil.

MODÈLE	TAILLE	REF	Hauteur	Largeur	Épaisseur (max)
Dossieret viscoélastique multiportance P951D	Taille Small	P951DS1HW	44 cm	39 cm	9 cm
	Taille Standard	P951D1HW	49 cm	44 cm	9 cm
	Taille Large	P951DL1HW	49 cm	50 cm	10 cm
Dossieret haute résilience P952D	Taille Standard	P952D1HW	49 cm	44 cm	9 cm

• Ce dispositif médical de Classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



GARANTIE

2 ANS

Entretien housses POLYMAILLE®



DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE DU COUSSIN D'AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE

- Soulage de manière importante les points d'appuis de la zone vertébrale.
- Contribue à diminuer le risque d'apparition d'escarre sacro-coccygienne du fait d'une diminution de l'instabilité sagittale («glisser-avant»).
- Réduit les effets de cisaillements sur le plan sacro-fessier grâce à un meilleur maintien postural du bassin.



PRINCIPE DE MULTIPOINTANCE


→ La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :

ZONE BLANCHE :

Mousse blanche de portance moindre permet une libération des pics de pressions de la zone vertébrale et favorise la prise d'empreinte morphologique.

ZONE BLEUE :

Mousse bleue de portance supérieure permet la décharge des points d'appuis à risques et accentue la stabilité latérale.

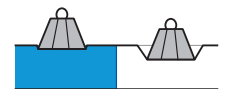


FORME ANATOMIQUE SPÉCIFIQUE

- Respecte la morphologie dorsale spécifique découlant d'une syphose (sillon vertébral).
- Respecte le creux lombaire, facteur important de la posture.

AUGMENTATION DU CONFORT DU PATIENT AU FAUTEUIL





- Excroissances latérales protégeant du contact direct des tubes de la zone axillaire/dorsale, souvent douloureuse, en particulier dans les cas d'utilisation intensive.

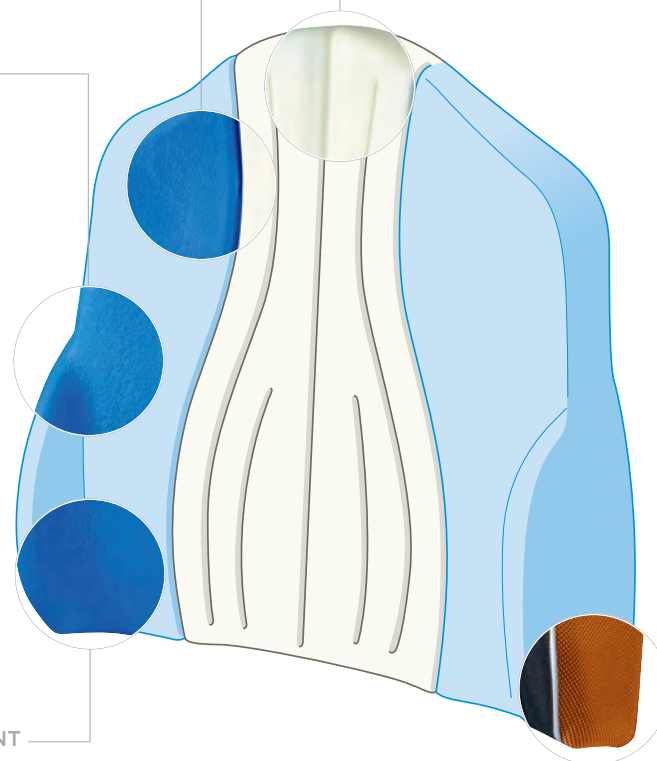

AMÉLIORATION DU POSITIONNEMENT ET DE LA STABILITÉ DU PATIENT




- Maintien de la zone du bassin permettant de prévenir le glisser-avant (instabilité sagittale) et le risque de chute, soucis permanent chez le sujet âgé, tant à domicile qu'en institution.
- Boudins latéraux assurant une diminution de l'instabilité latérale, fréquente chez les sujets handicapés.

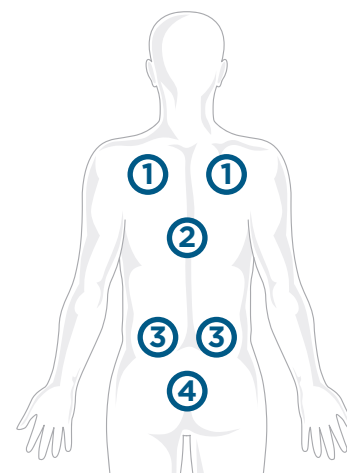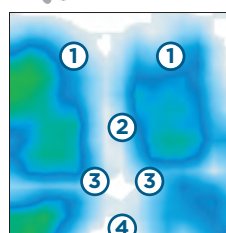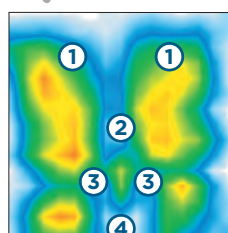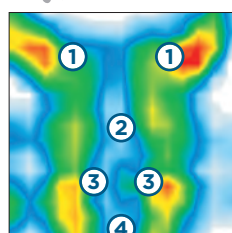HOUSSE SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE




- ① OMOPLATES/ÉPAULES
- ② ZONE VERTÉBRALE
- ③ ZONE LOMBAIRE
- ④ ZONE SACRO-COCCYGIENNE

PACKS THÉRAPEUTIQUES FAUTEUIL SYST'AM®


REF	DÉSIGNATION				Taille du dossier
PACK THÉRAPEUTIQUE VISCOFLEX® Standard & Dossieret					
PKCOUDOS10	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	36 cm	36 cm	8 cm	Small (44 x 39 x 9 cm)
PKCOUDOS15	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	38 cm	38 cm	8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS11	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 cm	42 cm	8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS16	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 cm	46 cm	8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS12	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 cm	42 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS13	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 cm	46 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS14	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	51 cm	46 cm	8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PACK THÉRAPEUTIQUE FAUTEUIL SUR-MESURE


→ Grâce au **conditionnement dorénavant unitaire de nos dossierets**, vous pouvez à présent aisément (en commandant les références coussins et dossierets séparément) composer votre **Pack Thérapeutique sur-mesure** !

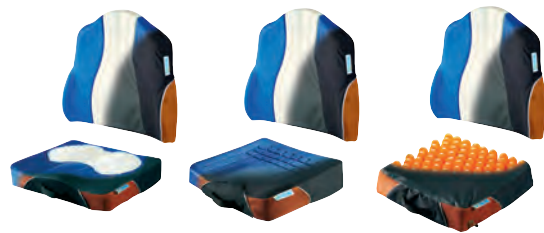

1 Vérifier les dimensions de l'assise de votre fauteuil

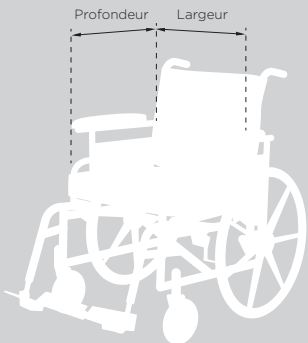

2 En déduire les dimensions maximales de votre coussin

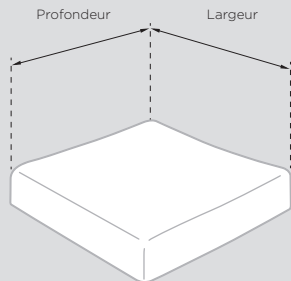

3 Choisir le modèle de coussin souhaité aux bonnes dimensions grâce au tableau page suivante




4 Déterminer la taille du dossieret approprié







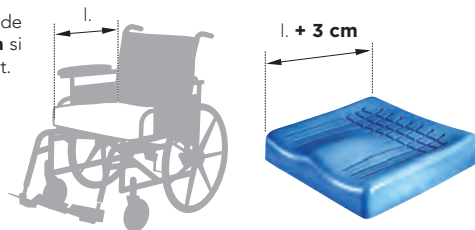





RECOMMANDATIONS

→ Prévoir une assise de profondeur + **3 cm** si emploi d'un dossieret.



→ Toujours poser le dossieret sur le coussin



1		2		3							4		
Vérifier les dimensions de l'assise de votre fauteuil		En déduire les dimensions maximales de votre coussin		Choisir le modèle de coussin souhaité aux bonnes dimensions							Déterminer la taille du dossier approprié		
LARGEUR DU FAUTEUIL (cm)	TAILLES DE COUSSINS DISPONIBLES (largeur x profondeur en cm)	POLYFORM® P311C 	DUOFORM® P341C 	VISCOFLEX® P361C (●) 	VISCOFLEX®+ P361CA 	VISCOFLEX®+ avec butée P361CP 	POLYAIR® 60 P301C (●) 	POLYAIR® AVEC OPTION CONFORT P301CMC 	DOSSERET Small P951DS1HW 	DOSSERET Standard P951D1HW P952D1HW 	DOSSERET Large P951DL1HW 		
Correspondance TAILLE - MODÈLE DE COUSSIN									Compatibilité des tailles dossier				
30 / 32	32 x 32 cm				●				+				
34 / 36	36 x 36 cm		●	●	●		●		+	+			
38	38 x 38 cm			●	●				+	+			
	38 x 43 cm				●				+	+			
40	40 x 40 cm	●		●●	●		●●			+			
	40 x 43 cm						●●			+			
	40 x 46 cm						●●			+			
	42 x 42 cm		●	●●	●	●		●		+	+		
	42 x 46 cm		●	●	●					+	+		
	42 x 50 cm				●					+	+		
43 / 44	43 x 43 cm						●●			+	+		
	43 x 46 cm						●●			+	+		
45	45 x 42 cm		●	●●	●	●		●		+	+		
	45 x 43 cm	●								+	+		
	45 x 46 cm		●	●	●	●		●		+	+		
	45 x 50 cm				●					+	+		
	46 x 40 cm						●●				+		
	46 x 46 cm						●●				+		
48 / 50	48 x 43 cm			●	●						+		
	51 x 46 cm		●	●	●		●●				+		
	51 x 50 cm			●	●		●●				+		
55	56 x 46 cm				●		●●						
60	61 x 50 cm				●		●●						

COUSSINS & AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE ASSISE